



U5

Elektrický invalidní skútr

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrický invalidní vozík Techlife U5 je určen pro širokou škálu osob se zdravotním postižením, které se potřebují pohybovat v otevřeném prostoru.

BEZPEČNOST

Elektrický skútr Techlife U5 je velmi jednoduchý na obsluhu a není zapotřebí speciálních schopností k naučení.

Podrobně si přečtěte instrukce před použitím i při skládání a rozkládání skútru.

POZOR!

Na cestách dávejte pozor a držte obě rídítka.

Nejezděte po strmých svazích, abyste se nepřevrhli.

Nedovolte dětem, aby skútr řídily sami.

Nejezděte za špatného počasí.

Techlife U5 není silniční vozidlo, nejezděte po silnici.

Struktura vozidla

03



Tlačítko
skládání

Úchyt

Poklop
kufru



Kufr

Pomocný
stojan

Klakson

Tlačítko kontroly rychlosti

Display



Zpátečka

Rychlosti jízdy

ROZLOŽENÍ

1. Před rozložením se ujistěte, že je skútr na rovném povrchu a má kolem sebe dostatečný prostor k rozložení.
2. Odepněte přezku řídítek (obr. 1) a zvedněte řídítka do svislé pozice (obr. 2). Následně zapněte zpět přezku řídítek.
3. Madla řídítek zvedněte do správné pozice.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

4. Stiskněte tlačítko řídítek (obr. 4), jednou rukou držte řídítka a uvolněte je do pozice viz. obr. 5.
5. Poté stiskněte tlačítko skládání (obr. 5), jednou rukou držíte řídítka a druhou úchyt skládání (obr. 6).



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

6. Postupujte shodně jako na obrázku 7, držte řídkta i úchyt a opatrně rozložte, až bude skútr plochý.



Obr. 7



7. Chytněte přední pojistku (obr. 8) a dotáhněte ji dolů, dokud neklikne a nezablokuje se.
8. Vložte jednu ruku do horní části opěradla a stiskněte zadní úchyt (obr. 9). Zvedejte opěradlo směrem nahoru o 90° (obr. 10).
9. Opětovným stisknutím zadního úchytu opěradlo vytáhněte směrem nahoru, dokud se nezablokuje na místě.



Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10

10. Otevřete přezku řídicího (obr. 11) a vytáhněte nahoru řídicí páčky do odpovídající polohy (obr. 12). Přezku zabezpečte zpět.
11. Skútr je rozložený (obr. 13).



Obr. 11



Obr. 12



Obr. 13

SKLÁDÁNÍ

1. Stiskněte zadní tlačítko (obr. 1).
2. Sklopte kufr (obr. 2)
3. Jednou rukou držte říditka a druhou rukou zvedněte přední pojistku (obr. 3).



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

4. Postupujte shodně jako na obr. 4. Jednou rukou držte řídítka a druhou rukou zvedejte skútr za úchyt, dokud nezacvakne.



Obr. 4

5. Složte madla řídítek (obr. 5) a celá řídítká sesuňte do nejnižší pozice.
6. Odepněte přezku regulace řídítek a řídítká složte (obr. 6).



Obr. 5



Obr. 6

Při převážení skútru zablokujte řídítka směrem nahoru, viz. obrázek.



VYTAŽENÍ BATERIE

Stiskněte tlačítko pro uvolnění a baterii vytáhněte.



Pozor!

Pamatujte na voděodolnost baterie

Nepoužívejte skútr během nabíjení baterie

Před prvním použitím nabíjte baterii naplno

Nabíjejte skútr pouze originální nabíječkou



SPECIFIKACE

Motor	48V 350W
Baterie	Panasonic lithium-iontová baterie 48V 8.7Ah
Pneu přední	Bezdušová, plná
Pneu zadní	Bezdušová, plná
Brzdy	Elektromagnetická brzdová jednotka

Doba nabíjení	4 hodiny
Hmotnost zařízení	28 kg
Max. rychlost	do 15 km/ hod
Dojezd	do 30 km
Velikost kol	Přední 8", zadní 10"
Max. zatížení	100 kg



ZÁRUKA

Produkt	Název části	Popis záruky	Doba záruky
Baterie	lithium-iontová	<p>Baterie je vystavena teplotám v rozmezí -10 ~ 40°C</p> <p>Napětí je netypické a není doporučeno nabíjet zařízení dříve, než úroveň nabití klesne pod 60%</p>	24 měsíců

Produkt	Název části	Popis záruky	Doba záruky
Skútr	Rám a kovová konstrukce	Použití do zátěže 100 kg, praskliny a deformace	24 měsíců
	Řídítka	Přirozené otevření svárů, odpájení, praskání	24 měsíců
	Malované díly, chromované díly, sedátko a opěradlo	Přirozené opotřebení velkých ploch, blednutí, teření	12 měsíců

Produkt	Název části	Popis záruky	Doba záruky
Elektrické části	ovladač, displej rychloměru, škrticí klapka, hlavní kabelový svazek, klakson, dálkový alarm, dálkový klíč, víceúčelový spínač, nabíječka	chyba výkonu nebo problém s kvalitou způsobený selháním produktu a nelze je opravit	12 měsíců
Motor	Motor	problémy se ztrátou fáze, vyhořením, demagnetizací	24 měsíců

POPRODEJNÍ SERVIS

Na následující se záruka nevztahuje:

1. Žádný platný záruční list, poprodejní servisní karta nebo nákup certifikátu produktu, faktura.
2. Uživatel demontuje, upravuje, opravuje a ničí normální stav produktu a dílů.
3. Produkt je poškozen nebo poškozen uživatelem v důsledku lidských faktorů, jako jsou kolize, přetížení a nepřiměřená rychlost během jízdy.
4. Škody způsobené nesprávným použitím uživatele.
5. Poškození prodáváných výrobků způsobené deštěm, ohněm, chemickou korozí nebo silou.
6. Částečně opotřebované díly běžným použitím (např. Pneumatiky)